

os olhos e com as mucosas! Em caso de contacto com o ácido das pilhas, lave de imediato os locais afetados com bastante água limpa e consulte um médico de imediato!

- Pilhas vazadas ou danificadas podem provocar queimaduras em caso de contacto com a pele. Por isso, se for esse o caso, use luvas de proteção adequadas.
- Em caso de vazamento das pilhas, remova-as imediatamente do produto, por forma a evitar danos.

Colocação/substituição das pilhas



ATENÇÃO!

Ao colocar as pilhas, tenha em atenção a polaridade correta.

1. Abra o compartimento das pilhas na parte de trás do aparelho.

- Insira duas pilhas novas (2x AAA de 1,5 V) no compartimento das pilhas com a polaridade correta. A polaridade correta é indicada no compartimento das pilhas.
- Feche novamente a tampa do compartimento das pilhas.

Operação



NOTA!

Para obter resultados de medição tão precisos quanto possível, não deverá comer nada, fumar ou consumir mais álcool nos 20 minutos anteriores à medição. Evite também chupar rebuçados e mascar pastilhas elásticas. Pode repetir a medição para verificar o resultado da medição. No entanto, deixe passar pelo menos 3 minutos entre as medições. Mantenha o alcoolímetro longe de substâncias voláteis, p. ex., tintas, gasolina, diluentes, etc.

Aquecimento

- Mantenha o botão POWER premido até que o dispositivo se ligue.
- No visor do alcoolímetro aparece «Warm up» e uma contagem decrescente de 10 a 0 segundos.



Nota: quando colocar o dispositivo em funcionamento pela primeira vez ou se não o tiver utilizado durante muito tempo, é aconselhável executar o processo de aquecimento várias vezes.

Medição

- Após o processo de aquecimento, o visor do alcoolímetro indica «Blow».
- Dá-se início a uma contagem decrescente de 10 a 0 segundos.
- Sobre suave e uniformemente durante 3 a 5 segundos para dentro da abertura prevista para o efeito na parte superior do dispositivo.



- Após a captação do ar de respiração, aparece um temporizador de 3 segundos.
- Distância de aplicação recomendada: 1 - 5 cm
- Concluída a medição, é apresentado o teor de álcool.
- A partir de um título alcoométrico de 0,5 g/l (por mil) é apresentada a indicação „Danger“.




- O valor de medição é apresentado durante aprox. 15 segundos. Depois, o dispositivo desliga-se automaticamente.

- BAC significa em inglês «Blood Alcohol Concentration», ou seja, concentração de álcool no sangue ou nível de álcool no sangue. Um BAC de 0,10 corresponde a 0,1 g de álcool em 100 ml de sangue.

Limpeza e manutenção

- À exceção da troca das pilhas, o alcoolímetro não requer qualquer manutenção, uma vez que não se trata de um dispositivo calibrado nem calibrável.
- Use apenas um pano seco e sem pelos para a limpeza. Em caso de sujidades fortes, humedeca o pano ligeiramente.
- Certifique-se de que não é possível a entrada de quaisquer líquidos na caixa.
- Se não estiver a utilizar o produto, guarde-o num local seco, dentro da embalagem.
- Não guarde o produto em espaços com ar contaminado.

Dados técnicos

Tensão de serviço:	3 V  0,5 W
Pilhas:	2 pilhas AAA de 1,5 V
Faixa de medição:	0,00-0,19 % BAC
Precisão de medição:	0,0-1,9 g/l (por mil) 0,01% BAC 0,1g/l (por mil)
Classe de proteção:	III
Dimensões:	aprox. 95 x 36 x 17 mm
Peso:	aprox. 43 g

Declaração de conformidade



A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha, declara sob plena responsabilidade que o produto anteriormente mencionado cumpre os requisitos básicos das diretivas UE indicadas. A declaração de conformidade UE pode ser solicitada ao fabricante, no endereço indicado no cartão de garantia.

Eliminação

Eliminar a embalagem



O material da embalagem é parcialmente reciclável. Elimine a embalagem de forma ecológica, depositando-a no ponto de recolha de material reciclável. Entregue-a num ponto de recolha público.



Este símbolo indica como separar corretamente os materiais da embalagem para a eliminação. Elimine as embalagens de papel no ecoponto para papel e as embalagens de plástico, metal ou materiais compostos no ecoponto amarelo.

Eliminar o produto

(aplicável na União Europeia e noutros Estados europeus com sistemas para uma recolha diferenciada de resíduos)



Os aparelhos usados não podem ser deitados para o lixo doméstico!

Se o artigo ficar inutilizável definitivamente, todo o consumidor é legalmente obrigado a entregar os aparelhos usados, separados do lixo doméstico, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito. Garante-se assim que os aparelhos usados são reciclados de forma adequada, evitando os possíveis efeitos negativos para o meio ambiente.

É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui ilustrado.



As pilhas e as baterias não podem ser deitadas para o lixo doméstico! As baterias não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Elas podem conter metais pesados tóxicos*) e estão sujeitas ao tratamento de resíduos perigosos. Pilhas e baterias que não estejam integradas de forma fixa no aparelho têm de ser removidas e eliminadas separadamente antes da eliminação. Entregar as pilhas e as baterias apenas no estado descarregado! Sempre que possível, utilize baterias em vez de pilhas de utilização única.

*) identificados com: Cd = cádmio Hg = mercúrio Pb = chumbo.

Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em www.wachsmuth-krogmann.com
© Copyright
Reimpressão ou reprodução (mesmo que parcial) apenas com a autorização da:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que a compõem, estão protegidas por direitos de autor. Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites restritos dos direitos de autor, sem a autorização da AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, é proibida e punível por lei. Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções, microfilmes, bem como à utilização e ao processamento em sistemas eletrónicos.

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha
50000445



12/2021

QUIGG

Alcoolímetro

Modell: WK1049-21



3 anos
GARANTIA
DO FABRICANTE


APOIO AO CLIENTE
 +351 707 450 015
 eService@sapo.pt

MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL



8094
22080943
50000445

Vista geral / Peças do aparelho

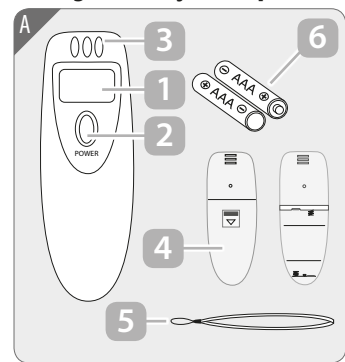

Componentes

- 1 Indicador LCD
- 2 Botão POWER
- 3 Sensor de teste respiratório
- 4 Compartimento das pilhas
- 5 Alça de transporte
- 6 2 pilhas AAA de 1,5 V

Informações gerais

Ler e guardar o manual de instruções

Leia todo este manual de instruções atentamente.

Tenha sempre em atenção todas as indicações de segurança. Se tiver alguma questão ou dúvida relativamente ao manuseamento do produto, entre em contacto com o seu distribuidor ou com o centro de assistência. Guarde bem este manual e, se necessário, entregue-o a terceiros.

Utilização correta

O âmbito de aplicação do alcoolímetro abrange a medição do título alcoométrico do ar de respiração expirado.

Esta não permite tirar quaisquer conclusões sobre o título alcoométrico no sangue. O aparelho não pode, sob circunstância alguma, ser utilizado para a avaliação da aptidão para conduzir ou da capacidade para executar atividades potencialmente perigosas.

O aparelho destina-se exclusivamente ao uso privado e não a uma utilização comercial. O produto não é nenhum brinquedo! Uma utilização diferente da anteriormente descrita ou uma modificação do produto não é permitida e pode dar origem a danos materiais ou mesmo ferimentos em pessoas. O

fabricante ou o fornecedor não assumem qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorreta ou inadequada.

Explicação dos símbolos



Data de edição do manual de instruções: mês/ano



ATENÇÃO! Este símbolo/palavra de advertência designa um perigo com um grau de risco médio que, se não for evitado, pode ter como consequência a morte ou ferimentos graves.



CUIDADO! Este símbolo/palavra de advertência designa um perigo com um grau de risco baixo que, se não for evitado, pode ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.



NOTA! Esta palavra de advertência alerta para possíveis danos materiais.



Declaração de conformidade (ver capítulo "Declaração de conformidade"): os produtos identificados com este símbolo cumprem todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Este símbolo significa que o produto funciona com baixa tensão de proteção (SELV/PELV).



Este símbolo identifica aparelhos que funcionam com corrente contínua.

Segurança

Indicações de segurança



ATENÇÃO!

Leia e considere todas as indicações de segurança apresentadas de seguida. A sua inobservância representa riscos de ferimentos e de acidentes, bem como de danos materiais no aparelho.

Indicações de segurança gerais



Perigos para crianças e pessoas com capacidades limitadas!

- Nunca deixe crianças sozinhas com o material da embalagem. Existe o perigo de asfixia através do material da embalagem. As crianças subestimam, muitas vezes, os perigos. Mantenha o produto sempre fora do alcance das crianças.
- O produto não pode ser utilizado por crianças.
- Este produto pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se supervisionadas ou se tiverem sido informadas sobre a utilização segura do produto e compreenderem os perigos daí resultantes. As crianças não podem

brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.



Perigo de danos!

- Não utilize o produto se detetar algum tipo de dano.
- Não mergulhe o produto em água ou noutros líquidos.
- Mantenha o produto longe de chamas abertas e superfícies quentes.
- Nunca manipule nem modifique o produto.



ATENÇÃO!

- Não assumimos qualquer responsabilidade por acidentes ou danos relacionados com um teste de alcoolemia realizado com este

aparelho!

- Este é um aparelho não calibrado e não calibrável para determinar o valor aproximado de álcool na respiração. Com base nele, é calculado para fins ilustrativos o valor de álcool no sangue através de uma fórmula padronizada e apresentado no visor.
- Trata-se, aqui, de valores aproximados, para fins de orientação. Estes não podem ser utilizados para determinar a aptidão para conduzir ou a capacidade para realizar atividades potencialmente perigosas.
- O nível de embriaguez até ao qual uma pessoa se mantém em condições de conduzir depende de muitos fatores e varia de pessoa para pessoa. Depende ainda do peso do corpo, dos alimentos recentemente ingeridos, da

quantidade e da duração do consumo de álcool, do estado físico e de saúde geral e de muitos outros fatores. Só um teste ao sangue permite tirar conclusões precisas.

- Por isso, regra geral, aplica-se: após o consumo de álcool, não conduza nem realize atividades perigosas.
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo (ver «Dados técnicos»).

Indicações de segurança relativas às pilhas



ATENÇÃO!

Indicações de segurança

- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, consulte um médico imediatamente!
- Nunca carregue pilhas não recarregáveis.
- Não coloque as pilhas em curto-circuito nem as abra. Como consequência, pode ocorrer o

sobreaquecimento, perigo de incêndio ou rebentamento.

- Nunca deite as pilhas para o fogo ou para a água.
- Não submeta as pilhas a qualquer tipo de carga mecânica.
- Retire as pilhas assim que estas ficarem vazias ou se não utilizar o produto durante um longo período.
- Não é permitido usar em simultâneo tipos de pilha diferentes ou pilhas novas juntamente com pilhas usadas.



CUIDADO! Risco de vazamento das pilhas

- Evite condições e temperaturas extremas que possam atuar sobre as pilhas, por exemplo, aquecedores/radiação solar direta.
- Evite o contacto com a pele, com